
	ANNEXE TEST HELIKIT - INFAI (RECUEIL D'AIR EXPIRE)			
	Identification A_MO_PREL_38_E	Approbateur Valérie GIGOT	Date d'application 11/11/2021	Version 1

1. Comment procéder ?

Le test respiratoire à l'urée permet de rechercher une infection active par *Helicobacter pylori*

Matériel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kit apporté par le patient (à retirer en pharmacie sur prescription médicale) : HELIKIT ou Test INFAI + jus d'orange ▶ Adulte : Test INFAI 75 mg + 200 ml de jus ▶ Enfant : Test INFAI 45 mg + 100 ml de jus
Précautions	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A jeun strict ▶ S'assurer que le patient n'a pas pris : <ul style="list-style-type: none"> • d'antibiotiques depuis 4 semaines avant le test • d'anti-histaminiques et inhibiteurs de la pompe à proton depuis 2 semaines avant le test • d'anti-acides depuis 24 heures avant le test ▶ En l'absence de grossesse ou d'allaitement
Protocole HELIKIT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dissoudre l'acide citrique dans 200 ml d'eau ▶ Faire boire la moitié au patient et conserver le reste <p>T0 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Déboucher le tube ▶ Plonger une paille au fond du tube ▶ Faire expirer le patient dans la paille pendant 15 secondes jusqu'à ce que la surface intérieure du tube soit embuée ▶ Retirer la paille du tube tout en demandant au patient de continuer à souffler ▶ Reboucher le tube immédiatement ▶ Identifier manuscritement le tube par la mention T0 ▶ Procéder de la même façon avec le deuxième tube ▶ Dissoudre l'urée dans les 100 ml de la solution d'acide citrique restante et les faire boire au patient <p>T30 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Déboucher le tube ▶ Plonger la deuxième paille au fond du troisième tube faire expirer le patient dans la paille pendant 15 secondes jusqu'à ce que la surface intérieure du tube soit embuée ▶ Retirer la paille du tube tout en demandant au patient de continuer à souffler ▶ Reboucher le tube immédiatement ▶ Identifier manuscritement le tube par la mention T30 ▶ Procéder de la même façon avec le quatrième tube

	ANNEXE TEST HELIKIT - INFAI (RECUEIL D'AIR EXPIRE)			
	Identification A_MO_PREL_38_E	Approbateur Valérie GIGOT	Date d'application 11/11/2021	Version 1

Protocole
INFAI

T0 :

- › Déboucher le tube
- › Plonger une paille au fond du tube
- › Faire expirer le patient dans la paille pendant 15 secondes jusqu'à ce que la surface intérieure du tube soit embuée
- › Retirer la paille du tube tout en demandant au patient de continuer à souffler
Reboucher le tube immédiatement
- › Identifier manuscritement le tube par la mention T0
- › Procéder de la même façon avec le deuxième tube
- › Dissoudre l'urée dans les 30 ml d'eau
- › Faire boire le jus d'orange au patient
- › Faire boire la préparation d'urée

T30 :

- › Déboucher le tube
- › Plonger la deuxième paille au fond du troisième tube
- › Faire expirer le patient dans la paille pendant 15 secondes jusqu'à ce que la surface intérieure du tube soit embuée
- › Retirer la paille du tube tout en demandant au patient de continuer à souffler
Reboucher le tube immédiatement
- › Identifier manuscritement le tube par la mention T30
- › Procéder de la même façon avec le quatrième tube

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
19.10.21	1	Première édition