




**Erforderliches Material :**

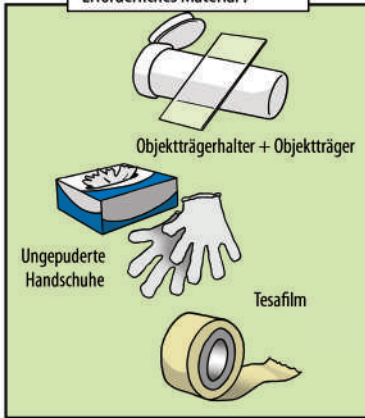


**Nehmen Sie den Abstrich morgens nach dem Aufwachen vor der Stuhlientleerung und dem Waschen der Analregion vor.**



**Ziehen Sie die Handschuhe an und ziehen Sie die Analfalte auseinander.**



**Drücken Sie mit dem Zeigefinger den Tesastreifen mit der klebenden Seite auf die Schleimhaut, ziehen Sie den Tesastreifen dann mit einem Ruck ab.**

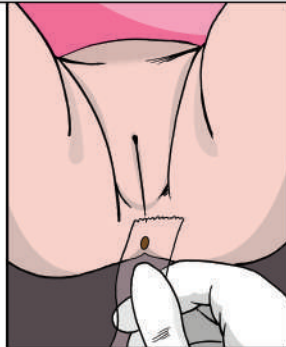

**Kleben Sie den Tesastreifen auf den Objektträger. Notieren Sie Namen, Vornamen und Geburtsdatum auf den weißen Rand des Objektträgers.**



**Stellen Sie den Objektträger in den Objektträgerhalter.**



**Bringen Sie die Sammlung zum Labor.**

