

	<b>ANNEXE</b> <b>PRELEVEMENT DE PLAIE - PEAU</b>			
	Identification <b>A_MO_PREL_40_M</b>	Approbateur Caroline SCHEIBER	Date d'application 09/09/2022	Version 1

## 1. Comment procéder ?

Recherche d'agents pathogènes à différencier des bactéries commensales

- 
- |                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Matériel</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Gants sans talc</li> <li>› Ecouvillon SWAB et/ou DACRON</li> <li>› Sérum physiologique</li> </ul> |
|-----------------|--|
- 

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Précaution</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>› A distance de toute antibiothérapie locale ou générale</li> </ul> |
|-------------------|--|
- 

- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>Protocole</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Mettre des gants</li> </ul> <p><b>Bactériologie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Utiliser un écouvillon SWAB pour frotter le cœur de la plaie</li> </ul> <p><b>Herpès PCR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Humidifier un écouvillon DACRON au sérum physiologique pour enlever croûte, pus ou suintement et le jeter</li> <li>› Avec un second écouvillon DACRON, frotter le plancher de la lésion</li> </ul> |
|------------------|--|
- 

## 2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
11.08.22	1	Première édition