



Le patient dépose le flacon contenant l'échantillon d'urines au laboratoire le plus vite possible.




Vérifier que le flacon soit bien identifié avec nom, prénom, date de naissance et heure du recueil.




Soulever l'étiquette blanche.  
Insérer les tubes et les percuter selon l'ordre recommandé\*.  
Maintenir le tube.

\* Ordre de prélèvement des tubes

1. Tube sans additif
2. Tube Boraté

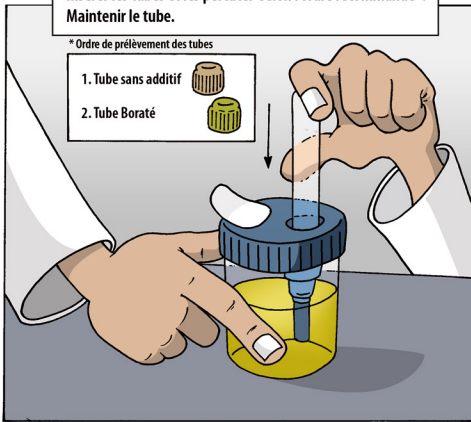

Remplir les tubes en fonction du niveau de remplissage indiqué sur l'étiquette et les homogénéiser par 8 à 10 retournements.

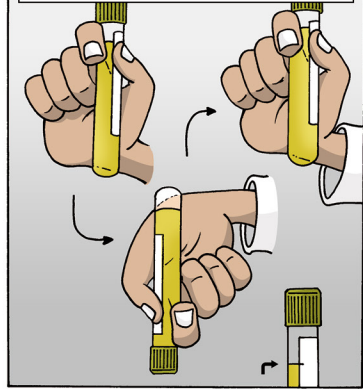

Replacer l'étiquette autocollante blanche sur l'orifice du couvercle.



Identifier les échantillons et les transmettre au laboratoire, à température ambiante, dans les meilleurs délais.

