

	<b>ANNEXE</b> <b>TEST O'SULLIVAN</b>			
	Identification <b>A_MO_PREL_38_B</b>	Approbateur Valérie GIGOT	Date d'application 11/11/2021	Version 1

## 1. Comment procéder ?

Dépistage précoce du diabète gestationnel

Matériel	Solution de glucose à 50 gr
Précautions	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Le matin de préférence</li> <li>› Jeûne non obligatoire</li> <li>› Patient au repos sur place pendant la durée de l'examen (1 heure) sans manger ni fumer</li> </ul>
Protocole	<p><b>T0 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prélèvement sanguin</li> <li>› Identification manuscrite du tube par la mention T0</li> <li>› Ingestion de 50 gr de glucose par la patiente en 2 à 5 minutes</li> </ul> <p><b>T60 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prélèvement sanguin</li> <li>› Identification manuscrite du tube par la mention T60</li> </ul> <p>En cas de vomissement entre T0 et T30, interrompre le test. Au-delà, poursuivre et le préciser sur l'étiquette de traçabilité.</p>

## 2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
19.10.21	1	Première édition