

# PRÉLÈVEMENT D'HÉMOCULTURE

## COMMENT FAIRE ?

### PRÉCAUTION À PRENDRE :

- Prélever les hémocultures avant tout autre prélèvement de sang

### SÉQUENCE DE PRÉLÈVEMENT :

- 1 Préparer 2 flacons aérobies + 2 flacons anaérobies + adaptateur spécifique (figure a).
- 2 Retirer la protection plastique et désinfecter les bouchons en caoutchouc à l'aide de compresse ou coton imbibé d'alcool 60° et laisser sécher 30 secondes à 1 minute (figure b).
- 3 Relier l'adaptateur au système de prélèvement en prenant soin de le visser à fond (figure c).
- 4 Prélever d'abord 1 flacon aérobie puis les trois autres.
- 5 Tenir chaque flacon verticalement pendant le prélèvement (figure 1).
- 6 Quantité minimale de sang 8 - 10 ml par flacon  
▶ Se servir des repères présents sur les flacons (figure 2).
- 7 Coller l'étiquette d'identification À COTÉ du code barre présent sur le flacon (figure 3).
- 8 Identifier chaque flacon en indiquant : ordre de prélèvement, heure et bras prélevé.
- 9 Si d'autres tubes de sang doivent être prélevés, l'adaptateur des hémocultures peut être utilisé (figure 4).

