

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">KETTERHILL</div>	<b>ANNEXE</b> <b>PROBENENTNAHME AN DEN AUGEN UND ANHÄNGE</b>			
	Identification <b>A_MO_PREL_40_F</b>	Approbateur Laurence AULOGE	Date d'application 09/07/2024	Version 2

## 1. Vorgehensweise ?

Nachweis von Erregern, welche für Augenläsionen und deren Anhänge verantwortlich sind.

Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ puderfreie Handschuhe</li> <li>▶ DACRON / SWAB Abstrichröhrchen</li> <li>▶ steriler Behälter</li> <li>▶ physiologische Kochsalzlösung</li> </ul>
Vorsichts- massnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ vor jeder Augentropfen Verabreichung, oder 48 Stunden nach Verabreichung ophthalmologischer Salbe</li> <li>▶ Handschuhe anziehen</li> </ul>
Protokoll	<p><b>Auge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ SWAB Abstrichstäbchen benutzen, um im inneren Augenwinkel zu entnehmen und im Inneren des unteren Augenlides, indem dieses nach unten gezogen wird</li> </ul> <p><b>Augenlid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ein SWAB Abstrichstäbchen benutzen, um die Läsion abzureiben</li> </ul> <p><b>Herpes PCR Test</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ein DACRON Abstrichstäbchen mit physiologischer Kochsalzlösung befeuchten, um Krusten, Eiter oder Wundflüssigkeit zu entfernen, und entsorgen Sie ihn</li> <li>▶ Mit einem zweiten DACRON oder SWAB Abstrichstäbchen die Läsion abreiben. Falls keine Läsion besteht, die Innenseite des Augenlides abreiben</li> </ul>

## 2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
08.08.22	1	Erstausgabe
27.06.24	2	Abschnitt "Material" : Abschaffung der EpilierPinzette. Abschnitt "Protokoll" : - Abschaffung des Abbufung mit der EpilierPinzette, der durch einen Abstrich der Läsion (Augenlid) ersetzt wurde. - Benutzung eines SWAB Abstrichstäbchen für den PCR Test, zur Herpes Suche möglich.