

	ANNEXE PRELEVEMENT POUR QUANTIFERON			
	Identification A_MO_PREL_38_D	Approbateur Valérie GIGOT	Date d'application 13/08/2024	Version 2

1. Comment procéder ?

Test diagnostique de la tuberculose latente

Kit sur demande au laboratoire

Matériel

4 tubes réactifs, respecter impérativement l'ordre :

- ◆ Un tube à bouchon gris ou contrôle nul
- ◆ Un tube à bouchon vert ou tube antigènes
- ◆ Un tube à bouchon jaune ou tube peptides
- ◆ Un tube à bouchon violet ou contrôle mitogène

Protocole

Prélèvement :

- ◆ Recueillir du sang veineux jusqu'au trait noir indiqué sur chaque tube (1 ml). Comme le débit est lent, maintenir le tube sur l'aiguille pendant 2 à 3 secondes jusqu'à atteindre le trait noir. Le prélèvement n'est valable que pour un volume compris entre 0,8 ml et 1,2 ml
- ◆ Si le prélèvement est effectué avec une aiguille à ailettes, il faut utiliser un tube de purge au préalable

Alternative pour les domiciles ou en cas d'absence de kit (pour éviter de faire revenir le patient) :

- ◆ Prélever 2 tubes héparinés (héparinate de Li) et transférer les échantillons au plateau technique le jour même, dans un sachet et à température ambiante

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
19.10.21	1	Première édition
10.08.24	2	Traduction en allemand.