

	ANNEXE QUANTIFERON TEST			
	Identification A_MO_PREL_38_D	Approbateur Valérie GIGOT	Date d'application 13/08/2024	Version 2

1. Vorgehensweise ?

Diagnostischer Test der latenten Tuberkulose

Kit auf Anfrage im Labor erhältlich

Material

4 Röhrchen, Reihenfolge unbedingt einhalten :

- ◆ 1 Röhrchen mit grauem Verschluss oder Null Kontrolle
- ◆ 1 Röhrchen mit grünem Verschluss oder Antigen Röhrchen
- ◆ 1 Röhrchen mit gelbem Verschluss oder Peptid Röhrchen
- ◆ 1 Röhrchen mit violetter Verschluss oder Mitogen Kontrolle

Protokoll

Blutentnahme :

- ◆ jedes der Röhrchen bis zum angegebenen schwarzen Strich mit venösem Blut füllen (1 ml). Da das Blut langsam fließt, das Röhrchen für 2 - 3 Sekunden auf der Nadel lassen, bis es zum angegebenen schwarzen Strich gefüllt ist. Das Blut kann nur verwendet werden, wenn ein Minimum von 0,8 ml bis 1,2 ml erreicht wird
- ◆ Wenn die Blutentnahme mit einer Butterfly Nadel durchgeführt wird, muss als erstes ein Entlüftungsröhrchen verwendet werden

Alternative für den mobilen Dienst oder falls kein Kit vorhanden ist (um zu vermeiden dass der Patient wieder kommen muss) :

- ◆ 2 Heparin Röhrchen (Li heparinat) genommen werden, welche im Laufe des Tages in die Zentrale gebracht werden müssen. Die Röhrchen müssen in einem Beutel Raumtemperatur transportiert werden

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
19.10.21	1	Erstausgabe
10.08.24	2	Übersetzung ins Deutsche.