

	ANNEXE PRELEVEMENT ORL			
	Identification A_MO_PREL_40_D	Approbateur Laurence AULOGE	Date d'application 30/09/2024	Version 4

1. Comment procéder ?

Recherche de germes responsables d'atteinte ORL.

Matériel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Matériel de protection : lunettes, gants sans talc, masque FFP2, masque chirurgical pour le patient si nécessaire ▶ Surblouse (prélèvement à domicile) ▶ Abaisse langue ▶ Sérum physiologique stérile ▶ Ecouvillon SWAB → tout agent pathogène ▶ Ecouvillon DACRON → HPV, Herpès ▶ Brossette + ThinPrep → HPV (La recherche de bactéries est impossible sur ThinPrep)
Précautions	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avant toute antibiothérapie ou 7 jours après l'arrêt du traitement ▶ Remettre l'écouvillon dans son contenant après prélèvement et identifier l'échantillon sans oublier la localisation ▶ Si plusieurs écouvillons pour un même patient, les rassembler avec un élastique ▶ Si demande d'analyses par PCR et par culture, prévoir 2 écouvillons ▶ Les bactéries <i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>Moraxella catarrhalis</i> et <i>Haemophilus influenzae</i> se recherchent uniquement par culture → prévoir un écouvillon SWAB en respectant la localisation prescrite par le médecin
	<p>Prélèvement de gorge</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ouvrir la bouche en grand ▶ Abaisser la langue avec l'abaisse langue ▶ Demander au patient de dire "AAAHHH" pour dégager le fond de la gorge ▶ A l'aide de l'écouvillon adéquat en fonction des analyses, prélever les zones rouges (érythémateuses) et/ou purulentes du pharynx et des amygdales ▶ HPV → récupérer à l'aide d'un écouvillon ou d'une brosse à dents le maximum de cellules par grattage de la lésion. Transférer dans le ThinPrep. Ne pas laisser l'écouvillon ou la brosse à dents dans le milieu
	<p>Prélèvement nasopharyngé</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Relever légèrement le nez du patient ▶ Utiliser l'écouvillon SWAB, le tenir comme un stylo et l'introduire perpendiculairement au plan du visage dans la narine, en longeant le plancher des fosses nasales ▶ Pousser jusqu'à sentir une butée puis effectuer un mouvement doux de rotation avant son retrait
Protocole	<p>Prélèvement de nez</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Introduire l'écouvillon adéquat profondément dans la narine ▶ Effectuer un mouvement doux de rotation avant son retrait <p>Prélèvement d'oreille</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Humidifier l'écouvillon DACRON au sérum physiologique ▶ Si présence de débris et croûtes, les enlever avec l'écouvillon DACRON puis le jeter ▶ A l'aide de l'écouvillon SWAB, prélever le pus ou écouvillonner l'oreille (entrée du conduit auditif) en 2 - 3 rotations <p>Prélèvement de bouche, lèvres, langue</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utiliser l'écouvillon adéquat en fonction des analyses ▶ En présence d'une lésion, prélever à son niveau et la mentionner <p>Prélèvement d'herpès</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Humidifier l'écouvillon DACRON 1 au sérum physiologique ▶ Si présence de débris et croûtes, les enlever avec l'écouvillon DACRON puis le jeter ▶ A l'aide de l'écouvillon DACRON 2 ou d'un SWAB, frotter la lésion

	ANNEXE PRELEVEMENT ORL			
	Identification A_MO_PREL_40_D	Approbateur Laurence AULOGE	Date d'application 30/09/2024	Version 4

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
24.08.22	1	Première édition
19.05.23	2	<ul style="list-style-type: none"> • recherche de bactéries impossible sur THIN PREP. • ajout de l'utilisation de la brosette et du milieu THIN PREP pour l'HPV.
19.04.24	3	<ul style="list-style-type: none"> • suppression du milieu UTM. • ajout de l'utilisation de l'écouvillon Swab pour HPV ou herpès. • suppression de l'utilisation d'un écouvillon DACRON pour la coqueluche.
30.08.24	4	<ul style="list-style-type: none"> • ajout des précautions. • une seule narine prélevée en cas de prélèvement de nez.