

KETTERHILL	ANNEXE PRELEVEMENT ORL			
Identification A_MO_PREL_40_D	Approbateur Pierre BLONSKI	Date d'application 09/09/2025	Version 5	Page 1 / 2

1. Comment procéder ?

Recherche de germes responsables d'atteinte ORL.

Matériel	▶ Matériel de protection : lunettes, gants sans talc, masque FFP2, masque chirurgical pour le patient si nécessaire ▶ Surblouse (prélèvement à domicile) ▶ Abaisse langue ▶ Sérum physiologique stérile (facultatif) ▶ Ecouvillon dacron (facultatif) -> pour éliminer les croûtes et débris si nécessaire ▶ Ecouvillon SWAB → tout agent pathogène y compris Herpès, HPV
Précautions	▶ Avant toute antibiothérapie ou 7 jours après l'arrêt du traitement ▶ Remettre l'écouvillon dans son contenant après prélèvement et identifier l'échantillon sans oublier la localisation ▶ Si plusieurs écouvillons pour un même patient, les rassembler avec un élastique ▶ Si demande d'analyses par PCR et par culture, prévoir 2 écouvillons ▶ Les bactéries <i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>Moraxella catarrhalis</i> et <i>Haemophilus influenzae</i> se recherchent uniquement par culture → prévoir un écouvillon SWAB en respectant la localisation prescrite par le médecin

Prélèvement de gorge

- ▶ Ouvrir la bouche en grand
- ▶ Abaisser la langue avec l'abaisse langue
- ▶ Demander au patient de dire "AAAAHHH" pour dégager le fond de la gorge
- ▶ A l'aide de l'écouvillon SWAB prélever les zones rouges (érythémateuses) et/ou purulentes du pharynx et des amygdales.

Prélèvement nasopharyngé

- ▶ Relever légèrement le nez du patient
- ▶ Utiliser l'écouvillon SWAB, le tenir comme un stylo et l'introduire perpendiculairement au plan du visage dans la narine, en longeant le plancher des fosses nasales
- ▶ Pousser jusqu'à sentir une butée puis effectuer un mouvement doux de rotation avant son retrait

Prélèvement de nez

Protocole

- ▶ Introduire l'écouvillon SWAB profondément dans la narine
- ▶ Effectuer un mouvement doux de rotation avant son retrait

Prélèvement d'oreille

- ◆ Si présence de débris et croûtes, les enlever avec un écouvillon dacron humidifié avec le sérum physiologique puis le jeter
- ◆ A l'aide de l'écouvillon SWAB, prélever le pus ou écouvillonner l'oreille (entrée du conduit auditif) en 2 - 3 rotations

Prélèvement de bouche, lèvres, langue

- ▶ Utiliser l'écouvillon SWAB
- ▶ En présence d'une lésion, prélever à son niveau et la mentionner

Prélèvement d'herpès

- ▶ Si présence de débris et croûtes, les enlever avec un écouvillon dacron humidifié puis le jeter
- ▶ A l'aide de l'écouvillon SWAB, frotter la lésion

	ANNEXE PRELEVEMENT ORL			
Identification A_MO_PREL_40_D	Approbateur Pierre BLONSKI	Date d'application 09/09/2025	Version 5	Page 2 / 2

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
24.08.22	1	Première édition
19.05.23	2	- recherche de bactéries impossible sur THIN PREP. - ajout de l'utilisation de la brosette et du milieu THIN PREP pour l'HPV.
19.04.24	3	- suppression du milieu UTM. - ajout de l'utilisation de l'écouvillon Swab pour HPV ou herpès. - suppression de l'utilisation d'un écouvillon DACRON pour la coqueluche.
30.08.24	4	- ajout des précautions. - une seule narine prélevée en cas de prélèvement de nez.
05.09.24	5	suppression du ThinPrep pour l'HPV, du dacron pour l'herpès